

Viaszmelegítő

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, olvassa el a tájékoztatót a biztonságos használat érdekében és őrizze azt meg a jövőben is!

I. Megjegyzés

1. Használat közben ne érjen a termékhez!
2. Ne érjen hozzá nedves kézzel!
3. A termék belsejében PC található. Ne tegye ki magas nyomásnak vagy ütésnek!
4. Biztosítsa a szellőztetést!
5. Ne törölje le róla a port vagy a vizet bekapcsolt állapotban, így elkerülheti a tüzet vagy egyéb balesetet!
6. Ha bármilyen rendellenes hangot, furcsa szagot vagy füstöt tapasztal, kapcsolja ki a készüléket!
7. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a kereskedővel, ha bármilyen problémát észlel!

Ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani!
8. A termék nem vízálló. Csak beltéri használatra alkalmas.
9. Tilos bekapcsolni, amikor nincs benne viasz! A hőmérséklet nem lehet magasabb 50 °C-nál sem üzemeltetés, sem tesztelés esetén!

II. A tápegység specifikációi

- Frekvencia: 1. 220V, 50Hz +/- 10%
- Teljesítmény: 60W
- Elektromos szigetelés minősítése: II.
- Hőmérséklettartomány: 30°C-tól 130 °C-ig állítható

III. A termék jellemzői

A viaszmelegítő készüléket a fogászat területén alkalmazzák. Minden típusú fogászati viasz melegítésére alkalmas. Könnyen megolvasztja a viaszt és folyékony állapotban tartja. Egyszerű beállítani a hőmérsékletet, mely összehasonlítható az aktuális hőmérséklettel.

IV. Funkciók

1. Professzionális a viasz mártogatásban.
2. Beállítható a szükséges hőmérséklet (+/- 1%)
3. Könnyű működtetni és használni.
4. Gyorsan megolvasztja a viaszt és folyékony állapotban tartja.
5. Jó a szigetelése és a hővezetési képessége.
6. Digitális kijelző, hőmérséklet-beállítás és -tartás jellemzi.
7. Könnyen összehasonlítható a beállított és az aktuális hőmérséklet.
8. A LED fény automatikusan jelzi a melegítést, majd kialszik, amikor a beállított hőmérsékletet elérte.
9. Könnyen észrevehető, ha valami gond van a pontos hőmérséklet-érzékelőnek köszönhetően.

V. Használati útmutató

Csatlakoztassa az áramkörhöz és kapcsolja be! A kijelző bal sarkában egy piros fény jelzi az aktuális hőmérsékletet. Válassza a Fahrenheitet vagy a °C-ot, majd állítsa be a szükséges hőmérsékletet! 120 °C-nál magasabb hőmérsékletet ne állítson be! Ezután a fűtés működésbe lép. Amikor már csak 4-5 °C hiányzik a beállított értékig, a piros

fény villogni kezd. A kívánt hőmérséklet elérésekor a piros fény automatikusan kikapcsol. A készülék megtartja az elért hőt. Ha 1°C-kal lecsökken a hőmérséklet, a fűtés ismét működésbe lép.