

DENU SEAL

DENU barázdazáró anyag, 2x2 g (2x1,2ml) + 10 kanül

Fényre kötő barázdazáró anyag nagyfokú tapadással és keménységgel.

A fogszuvasodás megelőzésére használható a barázdákban és résekben. Folyékony halmazállapotának köszönhetően könnyen és gyorsan behelyezhető, nagyfokú tapadása és kopásállósága tartós barázdazárást biztosít.

Színe: fehér

Jellemzői:

- Hidrofil tömőanyag optimális nanofillerrel.
- Nagyfokú tapadás.
- Magas kopásállóság.
- Kisfokú zsugorodás.
- Fluoridot ad le.

Alkalmazási javaslatok:

- barázdazáráshoz
- kis méretű fogszuvasodáshoz
- tejfogtöméshez

Kiszerelés:

2 X 1,2 ml-es fecskendő egyszer használatos kanülökkel.

Áttetsző, gyanta-alapú barázdazáró anyag

Leírás

A DenuSeal egy metakril-gyanta alapú, egykomponensű, fényre kötő barázdazáró anyag.

Összetétel

- izzított szilícium-dioxid
- bisphenol A glycedylmethacrylate
- színezékek
- fotoiniciátor

Indikáció

A zománc apró repedéseinek és réseinek feltöltésére a fogszuvasodás megelőzése céljából.

Ellenjavallatok

Ne használja olyan betegeknél, akik allergiásak a termékre.

Javasolt felhasználás

- Tisztítsa meg a fogakat, hogy eltávolítsa a lepedéket.
- Izolálja a fogakat a nyáltól kofferdam vagy vattarollni segítségével. Használjon nyálszívót vagy nagy teljesítményű elszívót, amennyiben lehetséges.
- Savazza meg az érintett fogfelszínt a gyártó előírásai szerint. A savazás után alaposan öblítse le a fogat vízzel.
- Levegővel szárítsa meg a fogfelszínt. Kerülje a nyállal történő szennyeződést. Ha a savazott felszínen nem jelenik meg krétafehér folt, ismételje meg a műveletet.
- Egy egyszer használatos kanül segítségével vigye fel a DenuSealt a fogra. Egy szonda segítségével oszlassa el az anyagot, így elkerülheti a buborékok kialakulását.
- Világítsa meg a felszínt 20 mp-ig egy fotopolimerizációs lámpával (420-500nm).

- A felesleges anyagot távolítsa el a fogról.
- **Tárolás**
- Ne tárolja magas hőmérsékleten és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja közvetlenül eugenol tartalmú anyagok mellett.
- Használat után azonnal helyezze vissza a zárókupakját.

Figyelmeztetések

- Kizárólag fogászati célra használható.
- Lehetőleg fogorvos vagy fogszakorvos használja.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Ha bőrirritáció vagy allergia jelentkezik, ne használja.
- Kerülje a bőrrel való érintkezését mielőtt az anyag megkötne. Ha az anyag bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel.
- Ha véletlenül szembe kerül vagy hosszabb ideig érintkezik a nyálkahártyával, bő vízzel öblítse le.
- Használjon védőkesztyűt és lehetőleg kerülje a kézzel való érintést.
- Ha hűtőben tartja, használat előtt várja meg, míg az anyag eléri a szobahőmérsékletet.
- Abban az esetben, ha az anyag nem kötne meg, ellenőrizze a lámpa fényerejét és lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy eladóval.
- Ne használja a lejáratú időn túl.