

DENU FLOW RESIN

DENU folyékony kompozit, 4g (2x2g) fecskendőben, több színben

Fényrekötő, nanofill, rezin alapú kompozit tömőanyag

A folyékony halmazállapot könnyű behelyezést tesz lehetővé a nagy precizitást igénylő helyeken vagy szűk résekben és hidaknál is. Jól használható alábélelésként a hátsó fogaknál.

Színek: A1, A2, A3, A3.5

Jellemzői:

- Hidrofil anyag optimális nanofillerrel.
- Nyomószilárdsága: 340 Mpa, hajlítási merevség: 150 Mpa, keménység: 65 Mpa.
- Folyékony halmazállapotának köszönhetően kiválóan kitölti az üregeket.
- Barázdazáráshoz is használható.
- Fogszabályozó ragasztásához is megfelel.
- A természetes fogszínhez közeli színeivel megfelel az esztétikai követelményeknek.

Alkalmazási javaslatok:

- I.-V. osztályú üregekhez
- kicsi és mély résekhez
- barázdazáráshoz
- alábéleléshez

Kiszerelés:

2X2g fecskendő egyszer használatos kanülökkel.

Termékleírás:

Fényrekötő, nanofill, rezin alapú kompozit tömőanyag

Összetétele:

Bis-GMA/TEGDMA/UDMA/Bárium üveg/Kovasav

A szervesen töltőanyag tartalma(részecske méret 0.01-2.5µm) kb. a súlyának a 60%-a.

Figyelmeztetés

- V. osztály javítása(nyaki fogszuvasodás, gyökér erózió, ék alakú kezelés)
- anterior helyreállítás (III., IV. osztály)
- kisebb posterior helyreállítás
- kiterjedt barázdátömítés a nagyörlők, kisörlőknél
- kompozit/kerámia héjak, fazetták javítása
- alávágások eltorlaszolása

Ajánlott eljárás

- Színválasztás: Tisztítsa meg a fogfelszínt, távolítsa el az idegen anyagokat.
- Üreg előkészítés: Távolítsa el az amalgámot, illetve minden olyan egyéb anyagot, melyek zavarhatják a műveletet.
- Pulpavédelem
- Fogzománc és dentin kezelés: Kövesse a gyártó útmutatásait,
- Adagolás: A védőkupak eltávolítása után helyezze az egyszer használatos hegyet a fecskendőbe. Alkalmazás előtt győződjön meg róla, hogy a tű hegye nincs bedugva. Ha csatlakoztatva van, akkor távolítsa el a hegyet és nyomjon egy kis mennyiségű pasztát a fecskendőből. Helyezzen fel új egyszer használatos hegyet, majd nyomjon ki egy kis mennyiségű Denu Flow Resin pasztát. Extrudálja az anyagot ecsettel vagy egyéb más eszközzel.
- Elhelyezés: A pasztát lépésenként helyezze ≤ 2mm-ig. A szivárgás elkerülése érdekében

húzza vissza.

- Kezelés: Tegyen ki magas intenzitású látható fénynek minden egyes helyreállítandó felületet. Tartsa a fényvezetőt olyan közel, emennyire csak lehet. Fénykezelje 20 másodpercig.
- Befejezés: Végül polírozza a felületet.

Tárolás:

- Ne tárolja magas hőmérsékleten, fénytől védve tárolja.
- Tartsa hűvös helyen.
- A terméket ne tárolja eugenolt tartalmazó anyag közelében.
- Használat után rögtön tegye rá a védőkupakot.

Figyelmeztetés:

- Fogászati célra.
- A készítmény fogorvosok, fogszakorvosok által használható. Tartsa be az útmutatásokat és az óvintézkedéseket.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Amennyiben a termék bőrirritációt okoz (akrilát érzékenység), ne használja tovább.
- Ha a készítmény bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel.
- Ha a készítmény véletlenül szembe, szájba kerül, azonnal mossa ki bő vízzel.
- Használjon védőfelszerelést (védőkesztyű, arcmaszka használata ajánlott).
- Használat előtt várja meg, amíg szobahőmérsékletű nem lesz.
- A lejárat dátumot követően ne használja a terméket.