

C-PULSE típusú elektromos vitalitásvizsgáló készülék

Használati Utasítás

I. Biztonsági előírások

Figyelmeztetés: Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatást, mert csak így tudja a terméket rendeltetésszerűen és jól használni!

1. Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt a gépet működtetni kezdené.
2. Mint minden elektromos berendezés, az a készülék is elektromágneses hullámokat bocsát ki. Ha a betegnek pacemakere van, vagy elektromos készülékkel operál, kérjük figyeljen arra, hogy a pulpa teszter ne legyen a közelben!
3. A készülék ne ütközzön más kemény tárggyal!
4. Kérjük, az elemeket a megfelelő módon helyezze be: a „+” és a „-”jelzések segítségével! Az elemeket vegye ki, ha nem használja hosszú ideig a gépet, vagy ha nagyobb távolságba szállítja.
5. Olyan elemeket használjon, melyek nemcsak az Ön lakóhelye szerinti nemzeti szabványnak, hanem a készülék igényeinek is megfelelnek.
6. Ha bárminemű változtatást eszközöl a terméken, megsértheti a biztonsági előírásokat és veszélyeztetheti a beteg épségét. Ha nem megengedett változtatást eszközöl a készüléken, elveszíti a kötelezettségvállalás és garancia minden formáját.
7. Ezt a készüléket csak szakemberek használhatják. Használni pedig kizárólag a használati utasítás szerint lehet.

II. Alapbeállítás

Mielőtt használni kezdené, kérjük ellenőrizze, hogy az új készülék minden alkatrésze és tartozéka megvan-e.

1. Fő gépegység
2. Tesztsondák (1 hosszabb és 1 rövidebb)
3. Vezeték
4. Rozsdamentes elektróda
5. Elem
6. Használati utasítás

III. Javasolt használati mód és a készülék részei

A Pulpateszter elektromos impulzust bocsát ki, és ezáltal stimulálja az fogideget. Az ideg stimulációra adott válaszreakcióját rögzíti, és ennek segítségével meg tudja becsülni annak állapotát. A készülék tehát nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvos pontos képet kaphasson a beteg fogidegéről.

A készülék részei:

1. Tesztszonda
2. Indító gomb
3. Sebességszabályozó gomb
4. Elemvédő fedél
5. Sebességkijelző
6. Kijelző
7. Csatlakozó a vezetékhez

IV. Használati útmutató

1. Mielőtt használatba venné a készüléket, válassza ki a megfelelő tesztszondát a fogideg helyzetétől függően, és csatlakoztassa a készülékhez. Ezután illessze a rozsdamentes elektródát a vezeték végére, a vezeték másik végét pedig csatlakoztassa a készülékhez.
2. Tegye teljesen nyálmentessé a fogat, szárítsa meg a felszínét, azért, hogy az elektromos impulzus ne juthasson át a fogínybe. A legfontosabb, hogy a fog közvetlen környéke száraz legyen.
3. Akassza a rozsdamentes elektródát a beteg szájának valamelyik részén a szájzugba. A fogorvos kiválasztja a megfelelő sebességet. (Nyomja meg a sebességszabályozó gombot: a High a nagy sebességnek, a Mid a közepes és a Low a kis sebességnek felel meg.)
4. Először kenjen egy kis ragasztót vagy fogkrémet a fogfelszínre arra részre, amelyhez. N a szondát érinteni fogja. Nyomja meg az indító gombot, és érintse a tesztszondát a foghoz merőlegesen. Ekkor kész az áramkör. A kijelző csipogni kezd, ahogy nő a kijelzett érték.
5. Ha a beteg fájdalmat érez, esetleg éles-érzet, vagy bénulás-érzet keletkezik, a fogorvosnak meg kell szüntetnie a pulpateszter használatát. Lejegyzi a kijelzett értéket, és ez lesz a fog tűréshatára.
6. A kijelzőn megjeleníthető legmagasabb érték a 80. A 0 és a 40 közötti értéknél jelentkező fájdalom-, élesség- vagy bénulás-érzet az élő fogbélre utal. Ha a 40 és 80 közötti értéknél nem jelentkezik semmilyen reakció, akkor a fogbelet részlegesen elhaltak mondhatjuk. Ha a teszter a 80-as értékhez ér, és semmilyen reakciót nem tapasztalunk, a fogbelet halottnak tekinthetjük.
7. A kijelzőn megjelenített érték - ott, ahol leállítottuk - , még 3 percig ott marad a tesztelés után, és akkor a készülék kikapcsol. (A készülék automatikusan kikapcsol 3 perc után.)

* Ha „LO” jelzést lát a kijelzőn, az azt jelenti, hogy kevés már a töltés, és cserélje ki az elemet.

V. Karbantartás

1. Tartsa tisztán a Pulpatesztert! Tárolja száraz és tiszta helyen! Tisztítsa meg akkor is, ha sokáig nem használta!
2. Ne szedje szét a készüléket csak úgy! Keresse meg a gyártót vagy a helyi kereskedőt, ha minőségi problémát vesz észre!

3. Azokat a részeket, amelyek a beteggel közvetlenül érintkeznek (pl. a rozsdamentes elektróda és a tesztszonda), minden egyes használat után fertőtleníteni kell autoklávval. A készüléket magát és a vezetéket havonta kell fertőtleníteni kívülről 75%-os etanollal.

VI. Technológiai szolgáltatás

Cégünk nemcsak a termékért vállal felelősséget, hanem technológiai szolgáltatást is nyújt. Műszaki osztályunkon kollégáink szívesen adnak tájékoztatást Önnek, ha technikai probléma merül fel.

VII. Garancia

A C-PULSE készülékre a vásárlás időpontjától kezdve 12 hónapos garancia van. A kiegészítőkre (vezeték, tesztszonda) nincs jótállás.

Garanciát csak akkor vállalunk, ha szakszerű módon és normál körülmények között használja a készüléket. Ha ettől eltérő módon használja a készüléket vagy a készüléket sérülés éri, akkor a garancia megszűnik.