

# DENU BOND

## DENU Bond, 5 ml, 5. generációs ragasztó anyag

5. generációs bond:1 flakonban a primer és bond. Külön kell savazni bondozás előtt!  
Köt a kompozit tömőanyagokhoz, kompomerekhez, fényre kötő rezintartalmú restorativ anyagokhoz.

Wet-bonding technikával kell felvinni a dentinre és a zománkra. Aceton tartlamú.  
Savazást követően 20 mp-ig be kell dörzsölni vele a fogfelszínt és 20 mp-ig meg kell világítani.

2-27°C között kell tárolni