

Ön- és fényre kötő resin csomk és csap felépítéshez

A DENU Dual Core egy kiváló, magas nyomástűrésű resin, mely ön- és fényre kötő tulajdonságának köszönhetően alkalmas minden típusú fog felépítéshez.

Javasolt

- egyszerű csomkfelépítéshez
- üvegszálal csap köré csomkfelépítőnek

Tulajdonságok

- Gyors és tartós kötés
- Magas nyomástűrés (310 MPa)
 - Könnyű kikeverni és használni
- Választható színek (sárga, kék)

Használati útmutató

1. Tisztítsa, majd törölje szárazra a fogat!
2. Készítse elő a kezelendő területet!
3. Végezzen előkezelést foszforsavval és a bonddal! (Ügyeljen a ragasztásra!)
4. Töltsön annyi DENU Dual Core-t az előkészített fogba, amennyit szükséges!
5. Az önkötés kevesebb mint 5 percig tart. Fényrekötés LED lámpával 20 másodpercig, halogén lámpával 40 másodpercig tart.
6. 5 perc Után csiszolhatja, polírozhatja.

Megjegyzés: Kötési idő (szájban)

- 4 percen belül, ha keverőcsőrt alkalmaz
- 6 percen belül, ha kézzel keveri.

Figyelmeztetés

- A munkaidő max. 5 perc lehet.
- Abban az esetben, ha szembe kerülne az anyag, bő vízzel öblítse ki és keressen fel egy szakembert!

- Ne érintkezzen az anyag a ruházatával, mert nehéz eltávolítani!
- Ne alkalmazza a lejárt szavatosságú terméket!
- Használata csak fogászati szakemberek számára ajánlott!

Tárolás

- Tartsa távol hőtől és közvetlen fénytől!
- Száraz, hűvös helyen tárolandó!
- Használat után szorosan zárja vissza a kupakot!

Eltarthatóság

- Gyártástól számított 2 év

Csomagolás

- 2x5 ml (10g), fecskendő, keverőcsőrök