

C-Blade típusú Guttapercha Vágó készülék

Használati Útmutató

Tartozékok:

1 db vezeték nélküli kézi darab (Ni-Mh akkumulátorral)
4 db vágó csőr
1 db angol nyelvű használati útmutató
1 db magyar nyelvű használati útmutató
1 db töltő állomás
1 db hálózati töltő kábel

Indikáció:

Gyökértöméskor a guttapercha felesleg gyors és higiénikus eltávolítását teszi lehetővé, a hirtelen kialakult magas hőmérséklet segítségével.

Technikai paraméterek:

Kézi darab hossz csőr nélkül: 12,6 cm
Átmérő: 1,9 cm
Szükséges töltő feszültség: 230V/50Hz
kb. 80 használat után szükséges tölteni

Biztonsági figyelmeztetések:

Ne merítse a készüléket, a kábelt és a töltőállomást vízbe vagy egyéb folyadékba!

Tartsa a készüléket kisgyermekek által elérhetetlen helyen!

Tartsa távol a készüléket és a kábeleit sugárzó hőtől, gyúlékony anyagoktól!

Soha ne érintse meg működés közben a vágó csőrt mert égési sebeket szerezhet és kikapcsolás után is percekig várjon a tisztítással!

Használatkor vigyázzon és ne érintse meg a vágó csőrrel páciense ajkát, ínyét, nyelvét, szájnyálkahártyát, kofferdam gumit, nehogy sérülést okozzon. Mindig használjon kofferdam gumit gyökérkezelésnél!

Bármilyen szivárgást tapasztal az akkumulátor környékén ne használja tovább és értesítse az importőrt vagy a gyártót!

A termék csak fogorvosi használatra ajánlott!

Használata:

Helyezze be a kiválasztott vágó csőrt a kézi darab végén levő nyílásba tövig. Győződjön meg róla, hogy a csőr vége a nyomógommbal átellenes irányba mutat. Próbálja ki: a nyomógomb megnyomásával 1 másodpercen belül felizzik a csőr vég és használatra alkalmas lesz. Mielőtt megnyomja a gombot már helyezze be a vágandó guttaperchához a csőr véget. Ha végzett a vágással engedje el a nyomógombot és legyen körültekintő a szájból eltávolításakor! Használat

után várjon míg kihűl a vágó csőr majd távolítsa el a kézi darabból és tisztítsa meg!

Soha ne tartsa 30 mp-ig vagy tovább nyomva a gombot!

Hibák:

Ha a gomb megnyomásakor nem melegszik fel a vágócsőr vége:

1. Nem érintkezik jól a vágócsőr csatlakozó vége a kézi darab nyílásába. - nyomja beljebb a csőrt!
2. Kevés az akkumulátorban az energia – töltse föl a töltőállvány segítségével!
3. Előbbi 2 dolog nem jön szóba, akkor komoly a baj – hívja szervizését vagy a dentál kereskedőjét!

Töltés:

Ha először tölti legalább 12 órán tegye!. Helyezze a kézi darabot a töltő állomásra függőlegesen, a hálózati töltő kábelt dugja be a 220V-os feszültségbe, felvillan a kézi darabon a nyomógomb melletti LED és csak akkor alszik el, ha feltöltődött a készülék. Soha ne töltse 12 óránál tovább! A NI-MH akkumulátor átlagos élettartama 2 év.

Tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás:

Minden használat után tisztítsa le a vágó csőről a reziduális szennyeződések, a kézi darabot törölje át felületfertőtlenítő kendővel. A vágó csőr autoklávozható max. 25 alkalommal. A szükséges paraméterek 121°Celsius fokon 20 percig vagy 132 Celsius fokon 5 percig.